

CAG Anleitung zur Probenentnahme

Bitte klären Sie zuerst mit Ihrem Zuchtverband oder Ihrer zuständigen Eintragungsstelle, ob die Probe von einem zugelassenen Tierarzt entnommen werden muss. Sofern erforderlich, benötigen wir Stempel und Unterschrift Ihres Tierarztes auf dem Einsendeformular.

Blutproben entnehmen – Pferd, Hund, Katze

Für jeden der von uns angebotenen Gentests können Blutproben eingesendet werden. Lassen Sie hierzu von Ihrem Tierarzt 0,5 – 1 ml Blut Ihres Tieres in ein EDTA-Blutröhrchen entnehmen. Wichtig hierbei ist, dass das Blut nicht gerinnt. Sofern es 1 bis 2 Tage nach der Entnahme versandt wird muss es nicht gekühlt werden sollte aber keines Falls dem Sonnenlicht oder starker Hitze ausgesetzt sein. Das Röhrchen ist eindeutig mit dem Namen des Tieres und dem Nachnamen des Besitzers zu versehen. Versenden Sie die in einem verschließbaren Beutel befindliche Blutprobe zusammen mit den Probenunterlagen, dem Bestellformular und Ihren Kundenangaben. Die Blutproben sollten uns 2 – 3 Tag nach der Entnahme vorliegen. Die Proben können standardmäßig per Post versandt werden, internationale Kunden bitten wir darum die Proben per Luftpost zu versenden.


Wangenschleimhautabstrich – Hund, Katze

Um eine DNA Kontamination zu vermeiden halten Sie die zu testenden Tiere von anderen Tieren fern und füttern Sie diese mindestens zwei Stunden vor Probenentnahme nicht. Bei Welpen empfehlen wir ihnen bis zum Abstillen keinen Abstrich zu machen.

Beschriften Sie jeden Abstrich mit den angegebenen Informationen:

- CAG Tier-ID und CAG Kundennummer (falls bekannt)
- Falls nicht bekannt mit dem Namen des Tieres und des Besitzers, sowie
- Dem Datum der Probenentnahme

1. Öffnen Sie den Umschlag mit dem Abstrichstäbchen und achten Sie beim Herausziehen darauf, die für den Abstrich vorgesehene Oberfläche nicht zu berühren.
2. Führen Sie das Stäbchen vorsichtig zwischen Wange und Zahnfleisch des zu testenden Tieres
3. Reiben Sie mit dem Stäbchen für mindestens 20 Sekunden fest an der Innenseite der Wange um Wangenzellen aufzunehmen (keinen Speichel).
4. Lassen das Stäbchen mindestens 2 Minuten trocknen. Stecken Sie das erste Stäbchen zurück in die Originalverpackung und wiederholen Sie das Prozedere mit dem zweiten Stäbchen.
5. Um die Stäbchen zu sichern, verschließen Sie die Verpackung mit den beigefügten Klebestreifen
6. Die Proben müssen nicht gekühlt werden und können standardmäßig per Post versandt werden. Internationale Kunden bitten wir die Proben per Luftpost zu versenden.

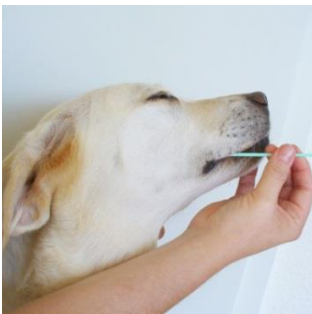

Probennahme beim
Hund



Probennahme
bei der Katze

Haarprobe – Pferd

Die DNA des Pferdes kann aus Haarfollikeln (Wurzeln) isoliert werden. Hierzu zupfen Sie 30 - 40 Mähnen- oder Schweifhaare. Vergewissern Sie sich, dass an jedem Haar ein Follikel vorhanden ist. Wichtig: die Haare müssen herausgezogen werden und dürfen nicht abgeschnitten werden (siehe Bilder).

Für die Haarproben bietet die CAG ein kostenloses Haarprobaset an. Die Haare können aber auch auf ein, mit den notwendigen Daten beschriftetes Stück Papier, geklebt werden. Die Haare werden mit einem Klebestreifen an der vorgesehenen Stelle des Formulars aufgeklebt. Achten Sie darauf das der Klebestreifen keines falls die Follikel berührt. Zum Schutz der Probe, sollte jede Probe in einem separaten verschließbaren Beutel oder Umschlag verpackt werden. Beschriften Sie das Formular mit folgenden Angaben:

- CAG Tier-ID und CAG Kundennummer (falls bekannt)
- Falls nicht bekannt mit dem Namen des Tieres und des Besitzers, sowie
- Dem Datum der Probenentnahme

Eine Kühlung der Proben ist nicht notwendig sie können standardmäßig per Post versandt werden, internationale Kunden bitten wir darum die Proben per Luftpost zu versenden



Die weißen Punkte am Ende der Haare sind die Haarwurzeln (Follikel).

Versandbereite Haarprobe



CAG Versandhinweise

Kostenlose Proben- und Versandsets fordern Sie bitte unter +49 (0) 7071 565 44 850, per E-Mail info@centerforanimalgenetics.com oder über das Kontaktformular auf unsere Website an. Die erforderlichen Formulare finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite.

Innerhalb von Europa erfolgt der Probenversand regulär per Post. Internationalen Kunden empfehlen wir den Versand per Luftpost. Für Proben, die von außerhalb Europa an uns gesendet werden, füllen Sie bitte die Warenrechnung aus und kleben sie diese an die Außenseite, für den Zoll, gut sichtbar an das Paket.

Blutprobenmüssen nach der Entnahme kühl gelagert werden und innerhalb von 2 – 3 Tagen nach Entnahme bei CAG vorliegen. Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig, die Probe sollte aber keiner direkten Hitze oder Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Wangenschleimhautabstrich- und Haarproben entnehmen Sie bitte gemäß unseren Angaben/Anweisungen und versenden Sie in den zur Verfügung gestellten Rücksende-Umschlägen. Mehrere Proben können in einem Umschlag an CAG versendet werden.

Versandadresse: CAG GmbH - Center for Animal Genetics
Paul-Ehrlich-Str. 23, D-72076 Tübingen, Germany

Die Bearbeitung der Probe beginnt unmittelbar nach Erhalt der Probe und dauert etwa 7-10 Werktage. Nach Eingang der Probe erhalten Sie eine vorläufige Rechnung per E-Mail, die Sie entweder per Überweisung oder Kreditkarte begleichen können. Der Versand der Testergebnisse erfolgt erst nach vollständiger Zahlung der Rechnung.